

Kar vidite
Kar slišite.
 kar naredite.

Sporočila, ki jih lahko vidite na zaslonu
 Tekstovna sporočila.
 Števec električnih sunkov.
 Pretečen čas.
 EKG krivulja.

Pričnite tu

Oseba se zgrudi – možen srčni zastoj

Vključite napravo

Naprava deluje

Ostala možna navodila: Postopek:


Vključite kabel. Priključite elektrode.

Naprava ne deluje Vključite in izključite napravo. Če ne deluje pričnite s KPO.

Sprostite gumb Sprostite gumb za postopek.

Zamenjajte baterije Zamenjajte vseh 10 baterij.

(n) posredovanih električnih sunkov

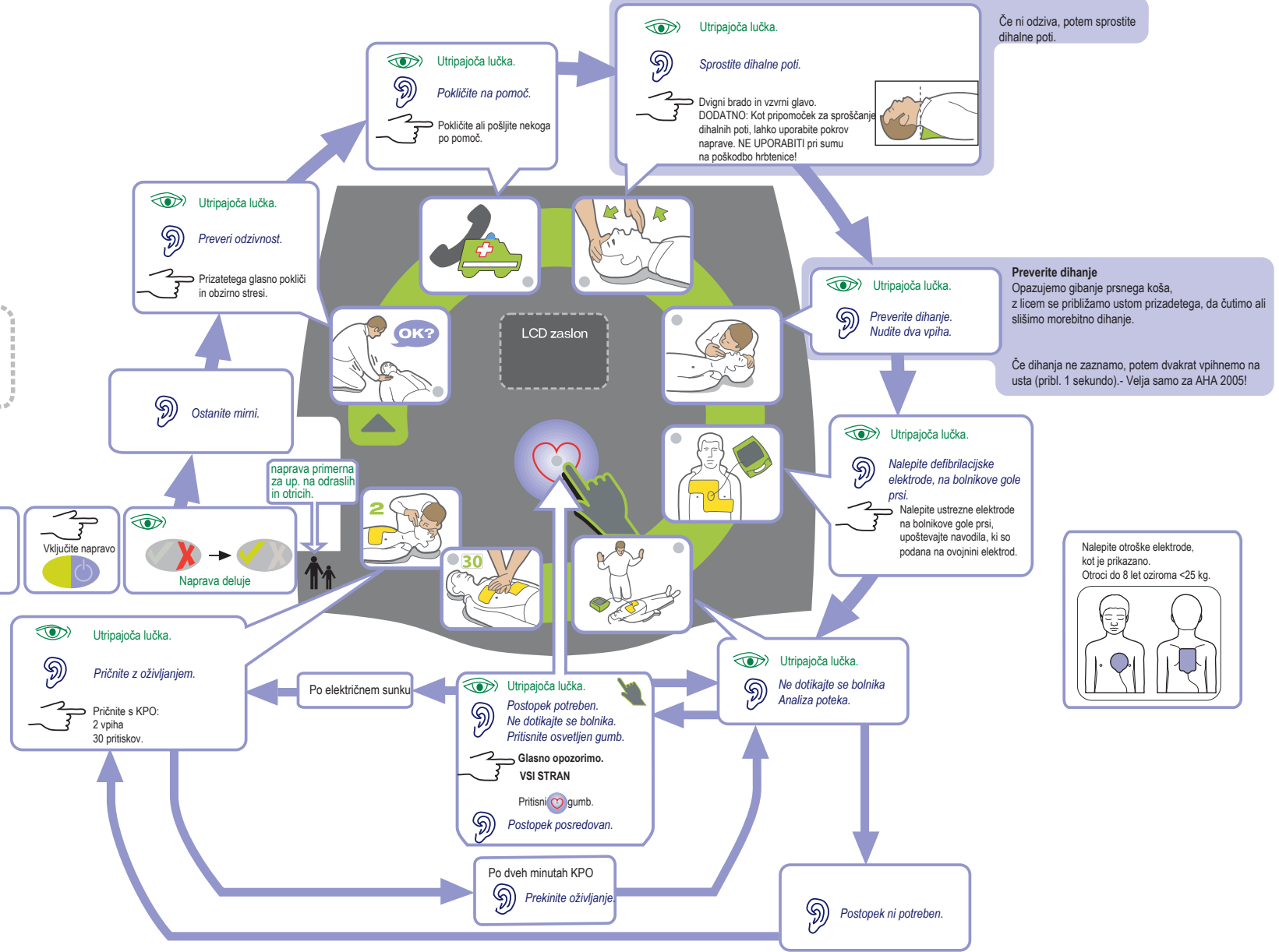

INDIKACIJE ZA UPORABO

Kadar ima bolnik očitne znake odsotnosti cirkulacije, ki se kaže z naslednjimi znaki:

- nezavest
- odsotnost normalnega dihanja
- odsotnost pulza in znakov cirkulacije

Pri uporabi na bolnikih mlajših od 8 let s telesno težo pod 25 kg, uporabite pediatrične elektrode

KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabite na bolnikih ki so:

- pri zavesti
- dihajo
- imajo zaznavne znake pulza in cirkulacije

UPORABNIKI DEFIBRILATORJA

Defibrilator ZOLL AED Plus je namenjen reševalcem, ki so se usposobili za delo z defibrilatorjem na tečajih vsaj temeljnih postopkov oživljanja. CPR funkcija skupaj z metronomsko funkcijo je namenjena, kot pomoč reševalcu, da doseže frekvenco pritiskov 100 na minuto, kakor je priporočeno v smernicah ERC/AHA 2005. CPR funkcije ne uporabite na bolnikih mlajših od 8 let.



ZOLL Medical Corporation
 269 Mill Road
 Chelmsford, MA 01824-4105
 978-421-9655 • 800-348-9011
 www.zoll.com